

Lenti a contatto GIORNALIERE



Questa tipologia di lenti è particolarmente indicata per sportivi, adolescenti e per tutti coloro che utilizzano le lenti a contatto saltuariamente.

Le lenti a contatto della linea ONE by OPTO IN permettono di soddisfare ogni esigenza visiva correggendo la **miopia**, l'**ipermetropia**, l'**astigmatismo** e la **presbiopia**.

ONE PLUS

Realizzate in **Hema**, un polimero idrogel idrofilo, ben tollerato per la sua **morbidezza**.

ONE HYDROGEL

Grazie al **Silicone Hydrogel** che le compone, uniscono la **praticità** della lente a contatto usa e getta ad un **elevato comfort**.

ONE AQUA

Prodotte in **Silicone Hydrogel** di ultima generazione, hanno un **elevata idrofilia superficiale** ed un **basso attrito**, garantendo un **alto e prolungato comfort quotidiano**.

Lenti a contatto MENSILI

ad altissima tollerabilità



Questa tipologia di lenti è consigliabile a chi intende indossare le lenti a contatto tutti i giorni.

Studiate per offrire un comfort elevato durante tutto l'arco della giornata, le lenti mensili OPTO IN vanno rimosse durante la notte, pulite e riapplicate il giorno successivo; dopo 30 giorni si sostituiscono con una nuova coppia di lenti. Le lenti a contatto mensili OPTO IN sono disponibili per **miopi, ipermetropi, astigmatici e presbiti**.

ROYAL LENS HYDROGEL

Prodotte con un **silicone** che utilizza l'esclusiva tecnologia Aquaform®, garantiscono un **elevato flusso di ossigeno** ed una **bagnabilità ottimale**.

ROYAL LENS COMFORT

Realizzate in **Proclear**, un bopolimero resistente alla disidratazione, **migliorano il comfort** nei casi di occhi delicati. Queste lenti sono particolarmente **consigliate a chi soffre di sensibilità oculare** ed a chi ricerca la **comodità**.

LENS SYSTEM

Ideali per correggere **bassi livelli di astigmatismo**; grazie al bordo sottile offrono il massimo comfort ed una visione nitida in tutte le situazioni (sport, guida) e condizioni di luce. La protezione dai raggi solari è garantita dal filtro UV.

LENTI A CONTATTO

Le lenti a contatto si adattano ad ogni esigenza e a tutti i difetti visivi, rappresentando una valida alternativa agli occhiali. Cambiano il modo di vedere e di essere visti: il miglior modo per apprezzare realmente i benefici offerti dalle lenti a contatto è provarle direttamente.

Cerca l'ottico **Opto in** più vicino a te sul sito

www.optoin.it

Saprà consigliarti la lente a contatto più adatta alle tue esigenze visive.

LENTI A CONTATTO



PRATICITÀ COMFORT LIBERTÀ



Produttori di lenti. Italiani. Indipendenti.



PRATICITÀ COMFORT LIBERTÀ

Le nuove tecnologie produttive hanno reso la **manutenzione** delle lenti a contatto **semplice e comoda**.

Le lenti a contatto **OPTO IN** sono disponibili a **ricambio giornaliero, mensile (o programmato)** adattandosi, quindi, alle più svariate esigenze del portatore e garantendo un'**elevata praticità d'uso**.

UTILIZZARE ED AVERE CURA DELLE LENTI A CONTATTO È FACILE:

Le lenti a contatto a **ricambio giornaliero** non richiedono alcun trattamento ed è **sufficiente toglierle e gettarle a fine giornata**. Le altre lenti a contatto morbide possono essere trattate utilizzando gli efficaci e pratici **sistemi di manutenzione e pulizia OPTO IN**.

I **materiali innovativi** e le **sofisticcate geometrie** delle lenti a contatto **OPTO IN** garantiscono un **comfort elevato** anche nei casi di stanchezza e secchezza oculare, dovuti ad ore di studio/lavoro davanti al computer, particolarità ambientali, o problemi di tollerabilità nell'uso di lenti a contatto.

In particolare, i nuovi materiali brevettati in **Silicone Hydrogel** sono stati specificatamente progettati per offrire l'**equilibrio perfetto** tra un **benessere oculare** eccezionale ed un **comfort straordinario**.

Scegliere la tipologia di lente a contatto **OPTO IN** più adatta alle proprie esigenze è importante per correggere i problemi visivi in modo efficace.

Le lenti a contatto **OPTO IN** permettono, infatti, di **soddisfare ogni esigenza visiva** correggendo la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo e la presbiopia.

Le lenti a contatto donano una sensazione di **libertà** a chi le indossa: la **visione a tutto campo nitida** e la possibilità di **muoversi senza limitazioni** permettono di affrontare ogni tipo di situazione.

È possibile lavorare, studiare e divertirsi con la massima tranquillità e con le migliori condizioni di visione.

Lo **sport** e l'**attività fisica** possono essere affrontati senza il timore che urti e movimenti bruschi ostacolino la visione perché le lenti a contatto seguiranno ogni movimento di chi le indossa.

Le lenti a contatto **migliorano la visione periferica** e permettono di condurre uno stile di vita **attivo e dinamico**.



Portare le lenti a contatto richiede senso di **RESPONSABILITÀ**

La maggior parte dei **problemi** sopraggiunge quando le lenti a contatto **non vengono sostituite con la frequenza prescritta o manipolate in modo inappropriato**.

PULIZIA

L'**igiene** è uno dei fattori più importanti per la prevenzione delle **infezioni** e altri **problemi agli occhi**.

Prima di maneggiare le lenti a contatto è opportuno **lavarsi accuratamente le mani ed asciugarle bene per evitare di opacizzarle o sporcarle**.

Le lenti giornaliere non necessitano di manutenzione. Tutte le altre lenti a contatto devono sempre essere sciacquate, deterse e conservate con le soluzioni dedicate e prescritte. Differenti liquidi, acqua compresa, possono danneggiare e compromettere la sterilità delle lenti stesse. Per la pulizia e la conservazione vanno scrupolosamente seguite le istruzioni contenute nelle soluzioni specifiche. È importante non dimenticarsi di pulire e risciacquare, con le soluzioni specifiche per la pulizia, anche il porta lenti e sostituirlo al termine di ogni confezione di liquido.

CONSERVAZIONE

Per garantire i massimi livelli di comfort e di igiene, le lenti a contatto vanno **conservate in un luogo fresco**, al riparo da occasionali fonti di calore e **sostituite con la frequenza prescritta dall'ottico**.

La data di scadenza rappresenta il periodo di tempo in cui le lenti a contatto mantengono la loro sterilità. È fondamentale **rispettare la data di scadenza** e la frequenza di sostituzione delle lenti a contatto.

Lenti a contatto **COLORATE**

Le lenti a contatto colorate sono **normali lenti a contatto correttive con iridi di colore diverso**, stampate con pigmenti speciali. Permettono di **cambiare e valorizzare il colore dei propri occhi**.